

## WAT IS DERMATIX

Dermatix is een siliconetherapie om ontsierende en vervelende littekens als gevolg van operaties, brandwonden en andere verwondingen te voorkomen dan wel te behandelen. Dermatix is een medisch hulpmiddel dat effectief is voor zowel het voorkomen als behandelen van littekens. Dermatix kun je makkelijk en pijnloos thuis aanbrengen op het litteken. Siliconetherapie is de meest gebruikte vorm van littekenbehandeling.

Dermatix maakt littekens vlakker, zachter en minder zichtbaar. Daarnaast vermindert het de roodheid, pijn en jeuk van het litteken. Dermatix is zeer geschikt voor zichtbare en beweegbare lichaamsdelen.

Dermatix is verkrijgbaar als Dermatix siliconengel en Dermatix siliconenpleisters.



## DE VOORDELEN VAN DERMATIX

- **Effectief bij de behandeling van bestaande littekens en het voorkomen van littekens**
- **Maakt littekens vlakker, zachter, meer elastisch en daardoor minder zichtbaar**
- **Vermindert roodheid, jeuk en pijn van het litteken**
- **Dermatix is makkelijk in gebruik, overal op het lichaam toe te passen en is nauwelijks zichtbaar**

Dermatix is verkrijgbaar bij uw apotheek. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Voor meer informatie:

Meda Pharma BV  
Postbus 167, 1180 AD Amstelveen  
Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen  
Tel: 020-751 65 00; Fax: 020-751 65 01

Email: [info@dermatix.nl](mailto:info@dermatix.nl)  
[www.dermatix.nl](http://www.dermatix.nl)

KOAGKAG-nr. 30-0110-0065

Code: 9115-22-0310

# Dermatix

Professionele  
behandeling  
bij littekens

Siliconetherapie  
met 3-voudige  
werking

## DERMATIX PROFESSELE BEHANDELING BIJ LITTEKENS

Een ritssluiting op je buik. Een wond na een plastische ingreep. Een brandwond. Deze en andere littekens vragen om de professionele siliconenbehandeling van Dermatix.

Bijna iedereen heeft wel ergens op het lichaam een litteken. Maar omdat de meeste littekens nauwelijks storend zijn, staan we er vaak niet bij stil. Grotere littekens en littekens die voor iedereen zichtbaar zijn, kunnen voor problemen zorgen, zowel fysieke klachten als psychische klachten kunnen het gevolg zijn. Hoe eerder je met de behandeling van een litteken begint, hoe groter de kans op een mooi resultaat.

Zodra na een operatie of een ongeluk de wond gesloten is en de hechtingen zijn verwijderd, kan al begonnen worden met littekenbehandeling. De kans op een ontsierend en vervelend litteken wordt zo verminderd. Bij littekens die niet vanzelf verdwijnen en bijvoorbeeld verhoogd, rood of pijnlijk zijn is behandeling met Dermatix siliconetherapie effectief door de drievoudige werking. Bestaande littekens kunnen vaak goed behandeld worden en substantiële verbetering laten zien. Het beste resultaat wordt bereikt bij verse littekens, dat wil zeggen littekens van niet meer dan 2 jaar oud.


## WAT ZIJN LITTEKENS?

**Littekenvorming is een natuurlijk onderdeel van het genezingsproces en treedt op wanneer de huid zich herstelt na een ongeval, operatie of ziekte.**

Hoe meer de huid beschadigd is, hoe langer het duurt om te genezen en hoe groter de kans op een zichtbaar litteken. Wanneer alleen de opperhuid is beschadigd, zullen er meestal geen littekens ontstaan. Littekens worden gevormd door littekenweefsel dat voor een groot deel uit bindweefsel (collageen) bestaat.

Littekens kunnen niet alleen ontsierend zijn, ook pijn, jeuk en verkleuring zijn vaak genoemde klachten. Het duurt meestal 12 tot 18 maanden voordat een litteken afvlakt en vervaagt. Er zijn echter littekens die niet uit zichzelf vervagen, maar die donker of rood, dik of hard blijven. Soms veroorzaakt een litteken blijvend jeuk, pijn of roodheid. Behandeling met Dermatix is effectief om de klachten te verminderen.


Er zijn verschillende soorten littekens, zoals hypertrofische en atrofische littekens en keloiden. Op onze website [www.dermatix.nl](http://www.dermatix.nl) vind je hier meer informatie over.

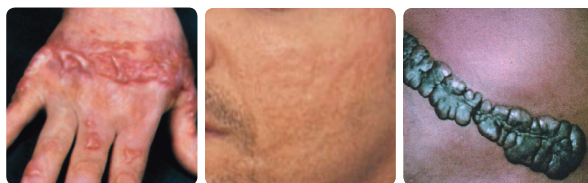

Drie soorten littekens.

## HOE WERKT DERMATIX?

Dermatix heeft een drievoudige werking. Dermatix herstelt niet alleen de vochtbalans, maar kan ook de dieper liggende lagen van de huid beïnvloeden.

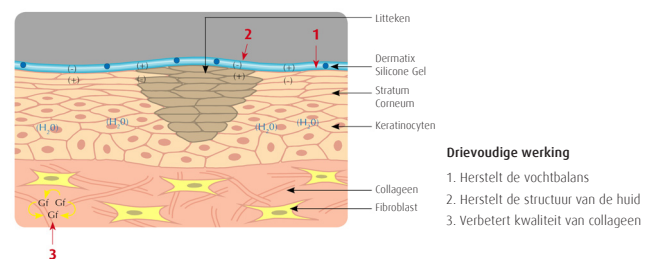

### 1. Dermatix herstelt de vochtbalans

De beschadigde huid is niet in staat een goede vochtbalans te onderhouden. Dermatix vormt een zuurstofdoorlatende, ademende laag op het litteken en zorgt voor herstel van de vochtbalans van de huid. Ontstekingsreacties zoals pijn, jeuk en roodheid worden zo verminderd.

### 2. Dermatix herstelt de structuur van de huid

Als een wond is ontstaan probeert het lichaam een infectie te voorkomen. Het lichaam wil daarom zo snel mogelijk het wondgat opvullen en beschadigde bloedvaten afsluiten om bloedverlies te beperken. Enige structuur ontbreekt in dit proces. Hierdoor wordt vaak meer bindweefsel aangemaakt dan nodig, waardoor een verhoogd litteken ontstaat. Dermatix zorgt, door statische lading tussen Dermatix en de huid, dat het bindweefsel (collageen) ordelijk geplaatst worden. Resultaat: minder verdikking en zachter littekenweefsel.


### 3. Dermatix verbetert de kwaliteit van het collageen

Door de snelheid waarmee het wondgat wordt gedicht ontstaat vaak teveel bindweefsel (collageen). Het collageen dat zich vormt is niet altijd van de juiste kwaliteit. Dermatix stimuleert het proces van de afbraak van dit eerst gevormde collageen. Hierdoor wordt het litteken vlakker en zachter.

## BEHANDELEN MET DERMATIX

Voor het best mogelijke resultaat begin je zo snel mogelijk met de behandeling van het litteken. De kans op een litteken wordt hiermee verminderd. De behandeling kan gestart worden direct nadat een wond gesloten is en wanneer de hechtingen verwijderd zijn.

Voor bestaande littekens wordt met een behandeling in het algemeen het beste resultaat behaald wanneer littekens vers zijn, dat wil zeggen niet meer dan 2 jaar oud. Dermatix maakt de littekens vlakker, zachter, meer elastisch en daardoor minder zichtbaar. Daarnaast vermindert Dermatix de roodheid, jeuk en pijn van het litteken.

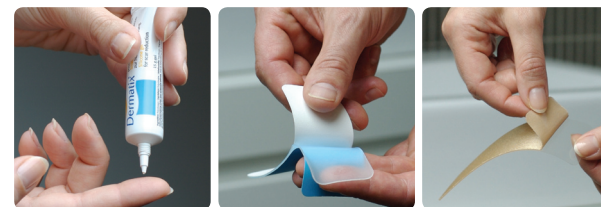

## DERMATIX SILICONENGEL

Dermatix siliconengel is transparant, eenvoudig in gebruik en geschikt voor gewrichten en beweegbare delen van het lichaam. Je brengt de gel twee keer per dag in een dunne laag op het litteken aan. De gel droogt snel op. Wanneer de gel niet snel opdroogt, heb je waarschijnlijk teveel aangebracht. Verwijder de teveel aangebrachte gel. Over de gel kan make-up worden aangebracht of kleding worden gedragen. Dermatix siliconengel is verkrijgbaar in tubes van 15 en 60 gram.

## DERMATIX SILICONENPLEISTERS

Er zijn twee soorten siliconenpleisters: de transparante Dermatix Silicone Sheet Clear, voor gebruik op zichtbare plaatsen en de Dermatix Silicone Sheet Fabric voor gebruik onder kleding. Dermatix Clear en Fabric Sheets zijn verkrijgbaar in verschillende formaten.

Plak de pleister op het litteken en laat deze voor een goed resultaat minimaal 12 uur en maximaal 23 uur zitten. De pleister en het litteken moeten éénmaal per dag worden gereinigd met een milde zeep. Gebruik hiervoor geen vochtinbrengende zeep of zeep wat olie of lotion bevat. Een pleister kan 5 tot 6 weken gebruikt worden.

## BEHANDELINGSDUUR DERMATIX

De behandelingsduur is afhankelijk van het litteken. Het beste resultaat bereik je echter door de gel en/of de sheets voor minimaal twee maanden te gebruiken. Dermatix is verkrijgbaar bij uw apotheek.